

サイトン BBLs 冷却水の補充

サイトン BBLs の、冷却水補充につき、ご説明します。

サイトン BBLs は、器機内に冷却水用の配管を持ち、その冷却水が器機の安定的な作動を手助けしています。通常の使用では冷却水が減少することは少ないのですが、それでも希に冷却水不足のエラーコードが出る場合があります。その時は、お客様ご自身にて冷却水を補充することが可能です。

器機本体背面の右上に、冷却水補充用のリザーバーキャップがあります。



このキャップは手で回して外せます。



冷却水を補充する際には、必ず“精製水”をご使用下さい。その他の種類の水を使用すると、器機内部の冷却水循環フィルタ等が劣化し、故障の原因になる恐れがあります。精製水は、薬局で販売しています。



冷却水補充後ハンドピースを装着した状態で、キースイッチを ON にします。冷却水を本体およびハンドピースに循環させると、冷却水の水位が減ることがあります。水位が一定量以下になると、「Coolant Level Low」のメッセージが表示されます。その際は再度継ぎ足し、補充を行ってください。冷却水は、補充口から水位がはっきり見えるくらいまで注いで下さい。空の状態から補充すると、約 1 リットル注入できます。補充し終わった後に器械を若干揺らすと、水位が見えやすくなります。

