

サイトン BBLs エラーコードの確認

サイトン BBLs のエラーコードにつき、ご説明します。



冷却水、ハンドピースや器械内部に何らかの不備がある場合、サイトン BBLs はエラーコードを表示して器械の状態を先生方やスタッフにお伝えします。

上記の写真の様に、エラーコードが “ID#: XX”（この写真の場合は 52 番）という形で表示されますので、その番号を弊社スタッフにお伝えください。現場での対処方法をご説明させて戴くか、修理対応に伺います。

また、比較的出やすいエラーコードも下記の通りまとめておりますので、ご参照ください。

BBLにエラーメッセージが表示される場合

エラー番号	エラーメッセージ	対応策 (対応策を実施しても治らない場合は、下記サービスセンター直通番号へお問合せ下さい。)
50	No Coolant Flow	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
51 / 52	Coolant Level Low	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
54	No Coolant Flow/Draining Water	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
63	Footswitch Fault	フットスイッチの接続を確認してください。
65	High Average Temp	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
66	Coolant Low Temp	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
67/ 81	Coolant High Temp	精製水を追加し、再度BBLを稼働させてください。
68	System Too Cold	システムが温まるまで電源を入れたまましばらくお待ちください。
69 / 71	Temperature Not Reached	システムが温まるまで電源を入れたまましばらくお待ちください。
79	BBL Lamp Needs Replacement	BBLハンドピースのランプの寿命です。サービス直通番号へご連絡下さい。
83	Attach BBL Cable	BBLハンドピースの接続を確認してください。（一度はずし、再度しっかりと接続してください。）

上記以外エラーメッセージが表示される場合は、一度電源を切り、再度電源を入れて同じ症状が現れるかご確認下さい。もし継続するようでしたら、下記サービスセンター直通番号に、**エラー番号とメッセージ**をご連絡下さい。

サービスセンター専用：0120-689-538

サービスセンターE-mailアドレス： service@sciton.jp