

サイトン BBLs 電源周りの確認

サイトン BBLs の電源関連につき、ご説明します。

1. 電源：

サイトン BBLs の電源は、単相 100V、3 穴のホスピタルグレードコンセントを使用しています。




2. 電源コントロールについて

サイトン BBLs の背面左下には、①コンセント差込口、②インターロック接続口、③フットスイッチ接続部、④ノーヒューズブレーカーがあります。これら全てがサイトン BBLs の電源コントロールに関連しています。

● 電源を入力時の確認事項

- ① コンセント差込口がしっかり接続されているか確認してください。
- ② インターロックがしっかり接続されているか確認してください。
- ③ フットスイッチがしっかり接続されているか確認してください。
- ④ ノーヒューズブレーカーが“I”になっているか確認してください。IとOは、INとOUTの略です。

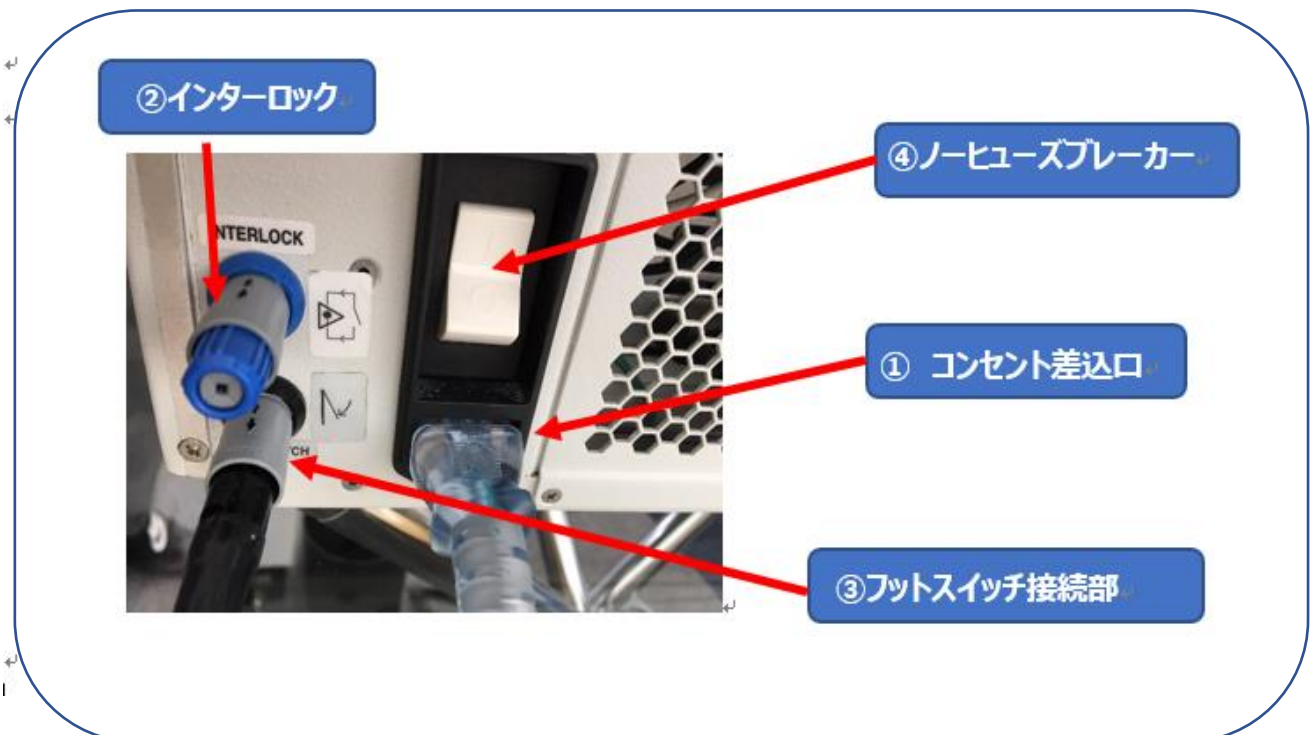

3. 緊急停止ボタンについて

サイトン BBLs の正面には、赤い “緊急停止ボタン” と BBLs を稼働する際に回す鍵の差し込み口があります。



赤い緊急停止ボタンが押されていると①(左側の写真)のような状態になり、黄色いラインが見えなくなります。この状態では電源は立ち上がりません。

BBLs を立ち上げるには、② (右側の写真) のように、黄色いラインが見える状態で鍵を右に回します。緊急停止ボタンが ON になっていて BBLs が立ち上がらない場合には、矢印に従い時計回りに緊急停止ボタンを回してボタンを引き上げ、ロックを解除します。



① 緊急停止ボタン
ON の状態



黄色いライン

② 緊急停止ボタン
OFF の状態