


## サイトン BBLs Wait For Temperature について

サイトン BBLs の Caution 機能の一つである、“Wait For Temperature”についてご説明します。  
サイトン BBLs はハンドピース先端の光照射部のコンタクトクーリングを、光治療器としては唯一、実際の温度をフィードバックしながら行っています(0℃から 30℃まで)。そのため、設定温度と実際の温度に解離があった場合、サイトン BBLs は“Wait For Temperature”というメッセージを表示させ、照射を一時中断して双方の温度が近づくまで待機します。  
このことにより、患者様への熱傷等のリスクを軽減し、安全性を確保しています。

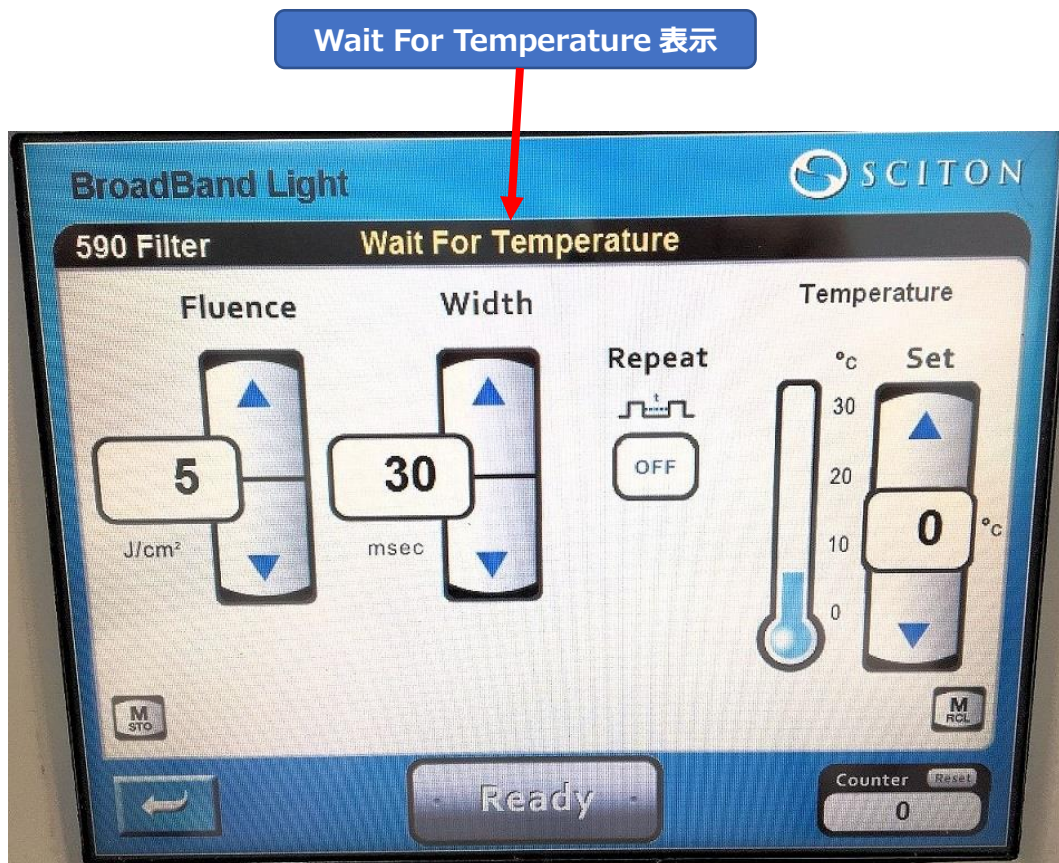

このメッセージが表示されたときは、設定温度と実際の温度が近づくまで少々お待ち下さい。